

Dihalna maska za anestezijo in CPAP NAVODILA ZA UPORABO

Informacija o izdelku

Dihalna maska za anestezijo in CPAP z napihljivim robom.

Namen uporabe

Maske VELEMEDICA so namenjene usmerjanju anestezije ali medicinskih plinov v pacientove zgornje dihalne poti brez vnašanje katerekoli naprave v sapnik.

Naprava je za uporabo v bolnišničnem in predbolnišničnem okolju.

Samo za uporabo s strani usposobljenega osebja.

Obrazna maska za anestezijo za enkratno uporabo.

Nesterilno, neprevodno, s povratnim ventilom.

Maska za obraz za enega pacienta.

Izdelana iz PVC, brez Lateksa.

Brez ftalatov.

Ta izdelek je varen za MR.

Navodila za uporabo

- Odstranite masko iz embalaže in jo preglejte. V primeru poškodbe, umazanije ali deformacije masko zavrzite in uporabite drugo masko.
 - Preverite napihnenost blazinice, če se ustrezno prilega in tesni na pacientovem obrazu.
 - Če ne potrebujete barvnega obročka, ga lahko odstranite.
 - Za prilagoditev napihovanja blazinice vstavite standardno brizgo s konico Luer v ventil za napihovanje. Po potrebi napihnite ali izpraznite.
 - Če je potrebno, lahko površino izdelka ročno očistite z vodo in blagim detergentom.
- Temeljito sperite s čisto vodo. Pustite, da se posuši in preverite, ali maska popolnoma deluje, preden jo ponovno uporabite na istem pacientu. Če maska ni popolnoma delujoča, jo je potrebno zavreči.
- Zavrzite po uporabi pri posameznem pacientu v skladu z bolnišničnim protokolom.

Opozorila

- Izogibajte se stiku z ostrimi predmeti, ki bi lahko poškodovali masko.
- Samo za uporabo pri enem pacientu. Uporaba pri drugih bolnikih lahko povzroči okužbo.
- Oblika in material naprave nista združljiva s postopki avtomatskega čiščenja ali sterilizacije, ker lahko pusti škodljive ostanke ali povzroči okvaro naprave.

- Prekomerno napihovanje ali prevelik pritisk za držanje maske na mestu lahko omeji ali zapre pacientovo dihalno pot.
- Premajhno napihovanje lahko povzroči slabo tesnjenje in puščanje.
- Maska je zasnovana za priklop na standardni priključek.







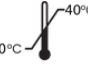









Shranjevanje

Izdelek shranite na suhem in temnem prostoru v skladu z oznakami na embalaži.

Rok uporabe

Rok uporabe izdelka je naveden na embalaži izdelka.

Uporabljeni simboli


	Izdelek ni sterilen		Za enkratno uporabo
	Medicinski pripomoček		Brez lateksa
	Ne izpostavljajte sončnim žarkom		Ne izpostavljajte dežju in vlagi
	Temperaturno območje shranjevanja		Temperaturno območje vlage
	Kataloška številka izdelka		LOT številka izdelka
	Rok uporabe izdelka		Preberite navodila za uporabo
	Ne vsebuje falfatov		Ne uporabite izdelka če je embalaža poškodovana
	Proizvajalec		Oznaka simbolizira skladnost izdelka po Regulativi (EU) 2017/475

Kontaktne informacije

Uvoznik za Slovenijo:

Medic-UM STORE d.o.o., Vinska Gora 44, 3320 Velenje
Telefon: +386 5 97 54 300, E-mail: info@medicum.si

 Shanghai International Holding Corp.GmbH(Europe), Eiffestrasse
80,20537 Hamburg Germany

 Xiamen Compower Medical Tech. Co., Ltd., Unit 301, No.16, Xianghong
Road, Xiang'an Torch Industrial Zone, 361101 Xiamen, China