

Kohezivni povoj

NAVODILA ZA UPORABO

Informacija o izdelku

Elastični kohezivni povoj vseh velikosti in barv.

Namen uporabe

Povoj se uporablja kot sekundarna obloga za nadzor kompresije. To so pripomočki za enkratno uporabo, ki niso sterilni.

Shranjevanje

Izdelek je potrebno hraniti pri normalni temperaturi in vlažnosti, ki ne presega 70%, stran od vročine in neposredne sončne svetlobe.







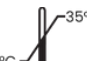







Transport

Izdelek med transportom zaščitite pred dežjem in vlago.

Navodila za uporabo

Odstranite embalažo bandažnega povoja, ovijte bandažni povoj okoli dela, ki ga je treba pritrditi, odrežite na ustrezno dolžino in prekrijte konec bandaže (približno 5 cm dolžine na koncu do tistega, ki je že ovit) in pritisnite na prekrivajoči se del, da se povoj zlepi.

Uporabljeni simboli

	Izdelek ni sterilen		Za enkratno uporabo
	Medicinski pripomoček		Brez lateksa
	Ne izpostavljajte sončnim žarkom		Ne izpostavljajte dežju in vlagi
	Temperaturno območje shranjevanja 5°C - 35°C		Temperaturno območje vlage 35% - 70%
	Kataloška številka izdelka		LOT številka izdelka
	Rok uporabe izdelka		Preberite navodila za uporabo
	Proizvajalec		Oznaka simbolizira skladnost izdelka po Regulativi (EU) 2017/475

Rok uporabnosti

Datum je odtisnjen na embalaži izdelka.

Previdnost

Izdelek je dovoljeno uporabljati samo na nepoškodovani koži. Rane je treba predhodno oskrbeti z ustrezno oblogo. Za enkratno uporabo - ni za ponovno uporabo. Ta izdelek ima določeno elastičnost. Pri fiksaciji zahteva ustrezen pritisk in število plasti, da ni pretesen ali preohlapen. Pretesen bo povzročil nelagodje ali neželene reakcije pri pacientu, ohlapna obloga pa ne bo učinkovito pritrjevala obloge na rano.

Ostalo

Izdelek po uporabi zavržete v skladu s predpisi.

Kontaktne informacije

Uvoznik za Slovenijo:

Medic-UM STORE d.o.o.
Vinska Gora 44, 3320 Velenje

Telefon: +386 5 97 54 300

E-mail: info@medicum.si



Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands



Nanjing 3H Medical Products Co., Ltd., No.5, Zhushan Road, Gaochun, Economic Development zone, Nanjing, Jiangsu Province, China